



## Conjunto de Umidificação

O Umidificador é projetado e indicado para uso em procedimentos de oxigenoterapia nos quais se faz necessária a umidificação do oxigênio fornecido ao paciente. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada.

### Composto:

- Tampa e Corpo fabricado em Nylon.
- Frasco Plástico de 250 ml com níveis de máximo e mínimo.
- Conexão de entrada de Oxigênio ou Ar Comprimido.
- Porca com Rosca de Metal ou Plástica.



### Acessórios:

- Máscara de PVC ou Polipropileno
- Extensão de PVC para Umidificador 2 Metros



Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli  
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764



WhatsApp: 11 5567 1762

[oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br)

[www.oxigel.com.br](http://www.oxigel.com.br)

**UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO  
CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO  
Registro M.S.: 10330520048  
(NÃO ESTERILIZADO)**

Nº PARTE:	2-100-0105 2-200-0105 2-300-0105	2-100-0110 2-200-0110 2-300-0110
Modelo:	Conjunto de Umidificação Umidificador	

**CONTEÚDO:**

- 1 Umidificador de oxigênio
- 1 Extensão em tubo de PVC com 2 m (somente nos conjuntos de umidificação)
- 1 Máscara PVC (somente nos conjuntos de umidificação)

**DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:**

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de oxigenoterapia nos quais se faz necessária a umidificação do oxigênio fornecido ao paciente.

**ADVERTÊNCIAS:**

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. O produto é fornecido não esterilizado.
2. O produto não pode ser autoclavado.
3. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
4. Recomenda-se o uso em um único paciente.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Encha o frasco do umidificador com água, obedecendo aos níveis máximo e mínimo.
2. Coloque a tampa e conecte a extensão no bico de saída da mesma (ver figura 1 na pág. 02/02).
3. Conecte a máscara na outra extremidade da extensão.
4. Rosqueie o umidificador, através da porca borboleta no topo da tampa, em um fluxômetro ligado à rede hospitalar de O<sub>2</sub> ou ligado à válvula redutora/reguladora de um cilindro de O<sub>2</sub>.
5. Abra e regule o fluxômetro de acordo com a prescrição médica.
6. Coloque a máscara no paciente.

**Obs.:** O nível da água deve ser mantido entre as marcas NÍVEL MÁXIMO e NÍVEL MÍNIMO.

**PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO:**

O umidificador é um artigo semicrítico e, com tal, deve passar por procedimento de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Desmonte o produto, separe suas partes e remova qualquer resíduo existente.
2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
3. Mantenha as partes do produto totalmente imersas na solução por um período de 30 minutos.
4. Usando luvas, enxágue em álcool ou água estéril e deixe secar.
5. Monte o produto e acondicione-o para ficar protegido contra contaminação até sua utilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de  $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$ .


**NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:**

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0036	06	Jul./2022	01 / 02

FIGURA 1.

**ESQUEMA DE MONTAGEM  
CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO  
2-100-0105**

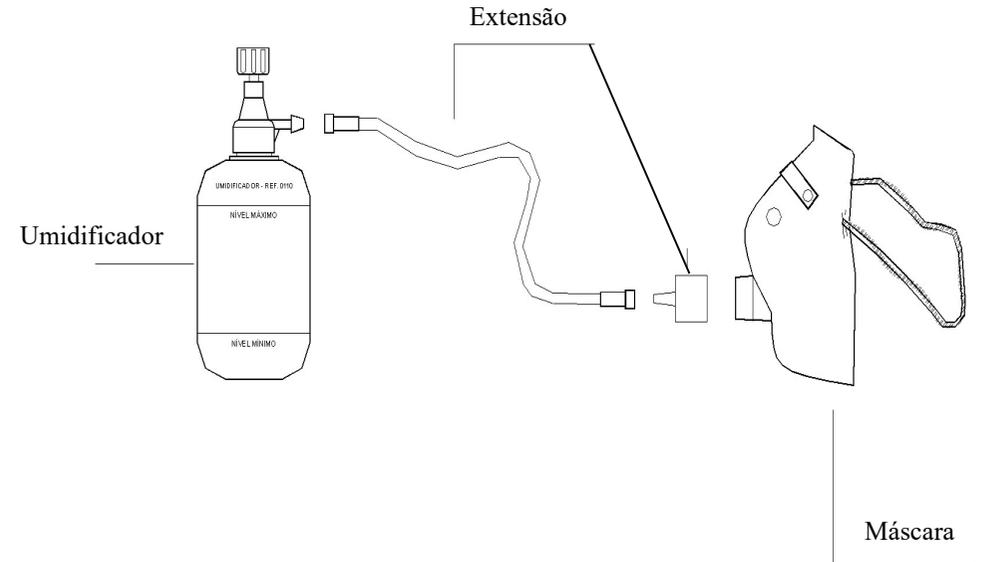

**GARANTIA:**

O produto é garantido pelo prazo de 1(um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

**FABRICADO E PRODUZIDO POR:**

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI  
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060  
São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766  
CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-8  
Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: [oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br) - Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA
3-990-0036	06	Jul./2022

**UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO  
CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO  
Registro M.S.: 10330520048  
(NÃO ESTERILIZADO)**

Nº PARTE:	2-100-0105 2-200-0105 2-300-0105	2-100-0110 2-200-0110 2-300-0110
Modelo:	Conjunto de Umidificação Umidificador	

**CONTEÚDO:**

- 1 Umidificador de oxigênio
- 1 Extensão em tubo de PVC com 2 m (somente nos conjuntos de umidificação)
- 1 Máscara PVC (somente nos conjuntos de umidificação)

**DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:**

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de oxigenoterapia nos quais se faz necessária a umidificação do oxigênio fornecido ao paciente.

**ADVERTÊNCIAS:**

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

- 1. O produto é fornecido não esterilizado.
- 2. O produto não pode ser autoclavado.
- 3. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
- 4. Recomenda-se o uso em um único paciente.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1. Encha o frasco do umidificador com água, obedecendo aos níveis máximo e mínimo.
- 2. Coloque a tampa e conecte a extensão no bico de saída da mesma (ver figura 1 na pág. 02/02).
- 3. Conecte a máscara na outra extremidade da extensão.
- 4. Rosqueie o umidificador, através da porca borboleta no topo da tampa, em um fluxômetro ligado à rede hospitalar de O<sub>2</sub> ou ligado à válvula redutora/reguladora de um cilindro de O<sub>2</sub>.
- 5. Abra e regule o fluxômetro de acordo com a prescrição médica.
- 6. Coloque a máscara no paciente.

**Obs.:** O nível da água deve ser mantido entre as marcas NÍVEL MÁXIMO e NÍVEL MÍNIMO.

**PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO:**

O umidificador é um artigo semicrítico e, com tal, deve passar por procedimento de desinfecção antes do uso. Para isso:

- 1. Desmonte o produto, separe suas partes e remova qualquer resíduo existente.
- 2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
- 3. Mantenha as partes do produto totalmente imersas na solução por um período de 30 minutos.
- 4. Usando luvas, enxágue em álcool ou água estéril e deixe secar.
- 5. Monte o produto e acondicione-o para ficar protegido contra contaminação até sua utilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de  $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$ .


**NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:**

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0036	06	Jul./2022	01 / 02

FIGURA 1.

**ESQUEMA DE MONTAGEM  
CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO  
2-100-0105**

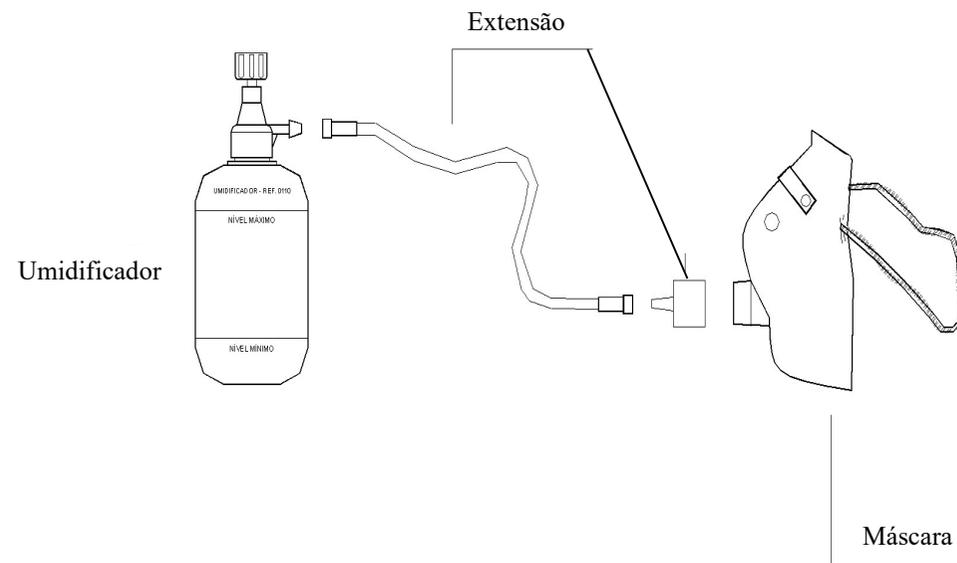

**GARANTIA:**

O produto é garantido pelo prazo de 1(um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador. Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

**FABRICADO E PRODUZIDO POR:**

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI  
Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060  
São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766  
CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-8  
Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: [oxigel@oxigel.com.br](mailto:oxigel@oxigel.com.br) - Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0036	06	Jul./2022	01 / 02